

## Craniotomieset

- 100% ondoordringbaar met een versterkt gebied
- Optimaal gevouwen voor steriel gebruik
- All-in one oplossing voor een snel en gemakkelijk gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Geïntegreerde vloeistofopvangzak met afvoer
- Vloeistof loopt via de zijkanten in de opvangzak
- Geïntegreerde incisiefolie






1 Vorm een vierkant met de zelfklevende afdekdoeken. Eerst de onderste, dan de bovenste ...



2 ... en tenslotte de afdeklakens aan de zijkanten.



3 Plaats het laken met de opvangzak in de juiste richting (zie pictogram).

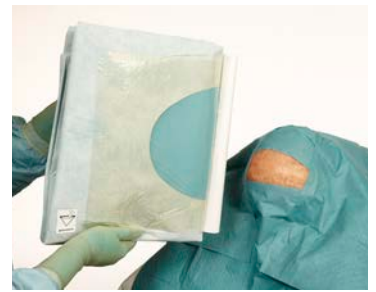

4 Verwijder het release papier.



5 Plaats het laken in het midden van het operatiegebied.



6 Vouw eerst de zijkanten open ...



7 ... en vouw vervolgens het laken naar beneden open.



8 Vouw het laken open in de richting van de voeten van de patiënt.

|        | Artikelnummer  |
|--------|----------------|
| 888142 | Craniotomieset |
| 888242 | Craniotomieset |

