



Mefix®

NONWOVEN FIXATIEPLEISTER


Mefix is de ideale fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes. Het biedt een veilige fixatie en de adhesielaag is zacht voor de huid.

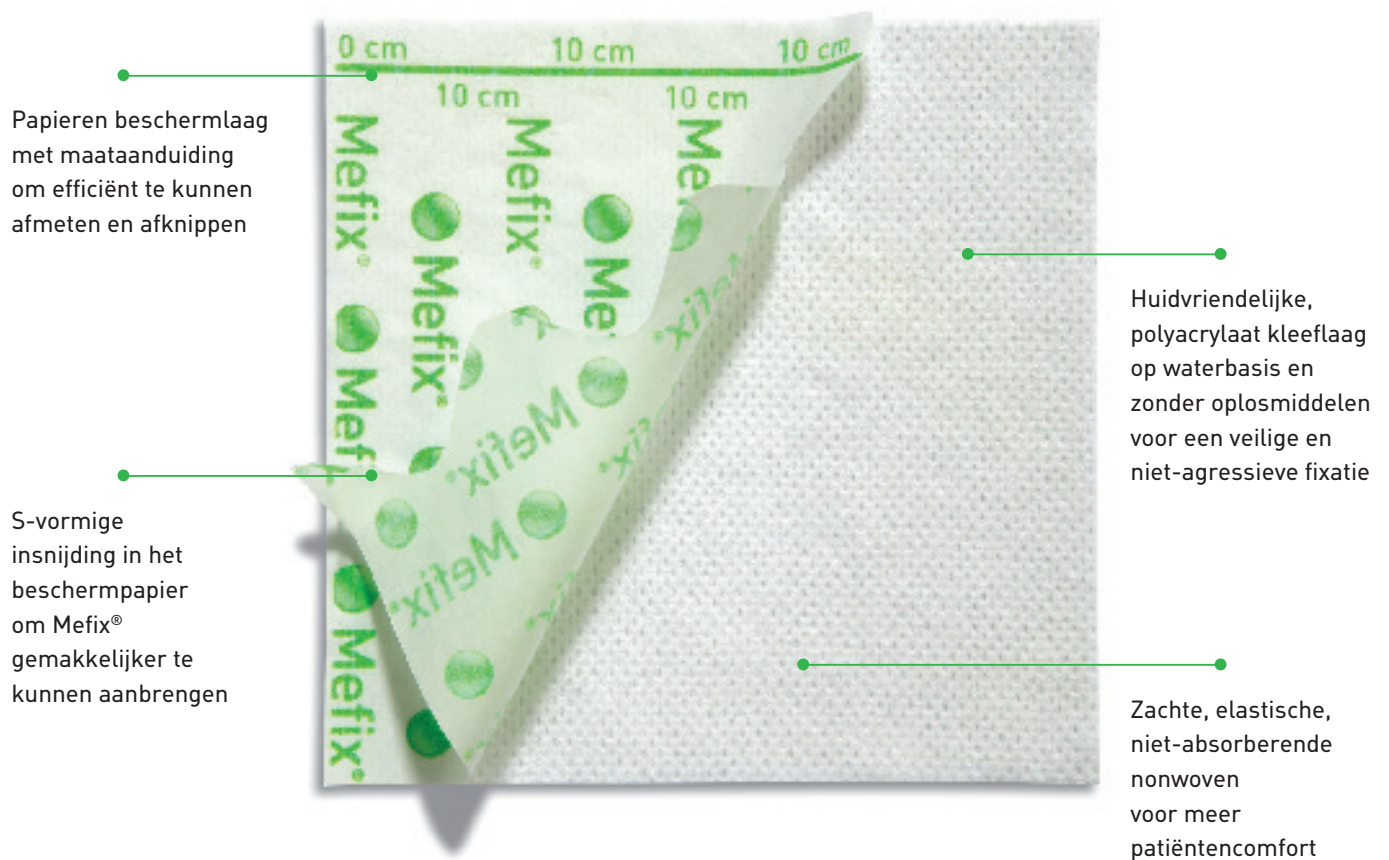


Gebruiksaanwijzing – fixatie door middel van de S-insnijding

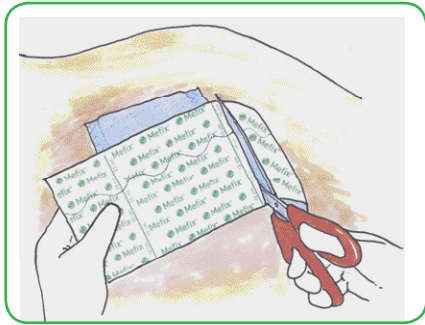

Knip Mefix® op de gewenste lengte.

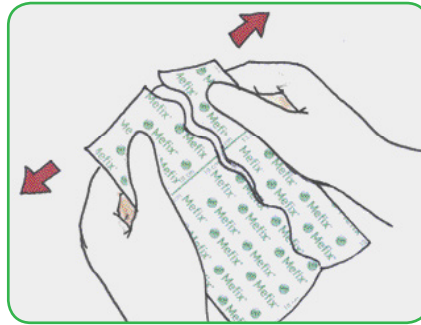

Breek het beschermpapier in twee door Mefix® zachtjes uit te rekken en te buigen. Verwijder het smalste gedeelte van het papier.

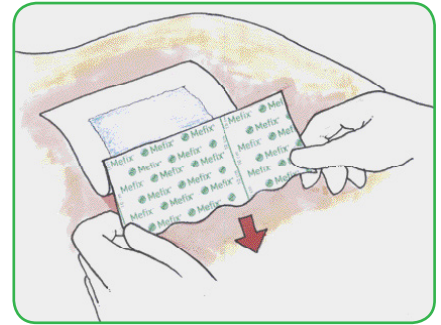

Breng het klevende gedeelte aan op de huid. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van het beschermpapier. Strijk Mefix® glad zodat de pleister goed kleeft. Vermijd bij het aanbrengen Mefix® uit te rekken.

Hoe werkt Mefix®?

De poreuze structuur van het nonwoven materiaal waarborgt de doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister is flexibel en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich vrij kan bewegen. Het materiaal is eveneens niet-absorberend en vormt een barrière tegen doorsijpeld bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is tevens niet-agressief voor de huid. Het beschermpapier is voorzien van maataanduidingen met telkens een interval van 10 cm zodat de pleister gemakkelijk in de gewenste afmeting geknipt kan worden; Dankzij de insnijding is het beschermpapier eenvoudig te verwijderen en aan te brengen.

Voordelen van Mefix®

- Huidvriendelijke adhesielaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- Beschermpapier met maataanduiding om efficiënt te kunnen afmeten en afknippen
- Vormt zich goed naar de lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort
- Kan gesteriliseerd worden door middel van stoom en EtO

Toepassingen

Mefix® kan gebruikt worden in de meest uiteenlopende situaties waarin fixatie vereist is, zoals de fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes.

Voorzorgsmaatregelen

Breng Mefix® aan in de anatomische houding en zonder tractie om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker wanneer Mefix® wordt aangebracht op gewrichten is dit een belangrijk aandachtspunt.



Assortiment Mefix® (niet-steriel)

Afmeting (breedte)	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
<u>10 meter rollen</u>				
2,5 cm	12337994	310250	1 stuk	39 stuks
5 cm	12338001	310500	1 stuk	20 stuks
10 cm	12338028	311000	1 stuk	20 stuks
20 cm	12338044	312000	1 stuk	10 stuks
30 cm	12338052	313000	1 stuk	10 stuks
<u>2,5 meter rollen</u>				
5 cm	13253220	310570	1 stuk	36 stuks
10 cm	13253239	311070	1 stuk	18 stuks
15 cm	13253247	311570	1 stuk	12 stuks