



Mextra® Superabsorbent

SUPERABSORBEREND WONDVERBAND MET EEN VLOEISTOFAFWERENDE TOPLAAG


- Optimaal exsudaatmanagement
- Biedt meer patiëntencomfort
- Geschikt voor gebruik onder compressieverbanden

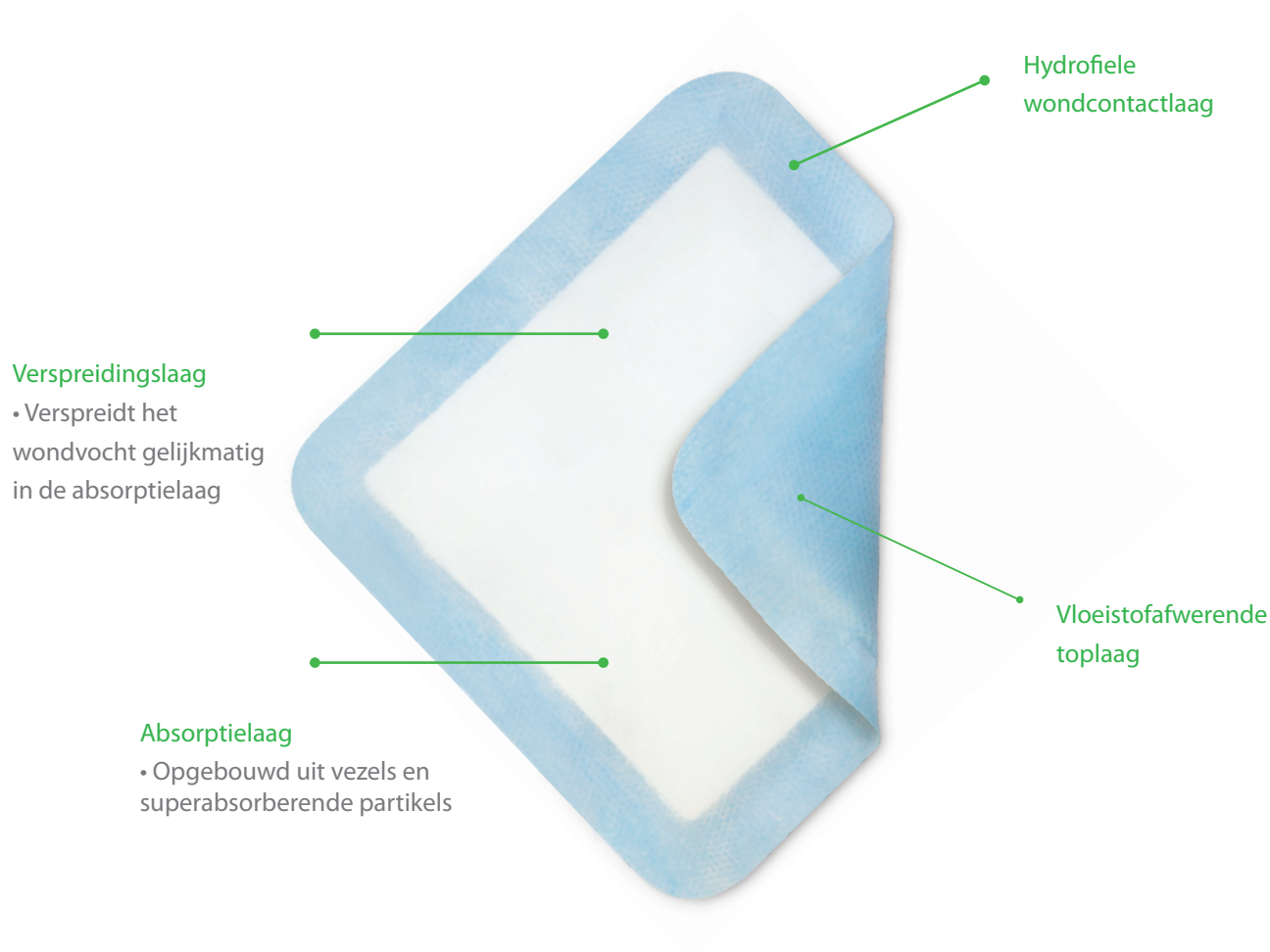


Gebruiksaanwijzing

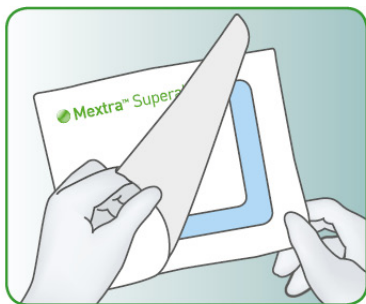

Reinig het wondgebied en kies een geschikte afmeting van Mextra® Superabsorbent.

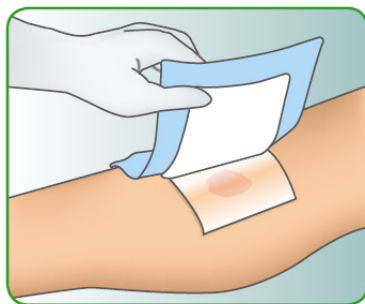

Breng Mextra® Superabsorbent rechtstreeks aan op het wondgebied met de witte zijde van het verband op de wond. Voor het beste resultaat moet het wondkussen de droge omliggende huid met minstens 2 cm overlappen. Mepitel® of Mepitel® One kunnen ook gebruikt worden in combinatie met Mextra® Superabsorbent.

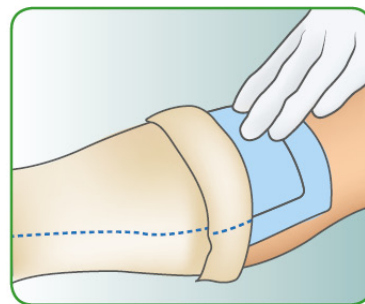

Fixeer Mextra® Superabsorbent met een geschikt verband zoals Tubifast® 2 Way Stretch® buisverband of een fixatietape. Mextra® Superabsorbent kan gebruikt worden tijdens compressietherapie.

Hoe Mesorb werkt

Mextra® Superabsorbent absorbeert wondvocht door de wondcontactlaag, houdt dit vast in de kern waardoor het risico op maceratie wordt geminimaliseerd. De vloeistofafwerende nonwoven ruglaag werkt als een wondvochtbarrière en voorkomt doorlekken van wondvocht.

Voordelen

- Uitstekende absorptie en retentie
- Minimaliseert het risico op maceratie en doorlekken
- Behoudt integriteit en is niet volumineus na absorptie van wondvocht
- Beschermt tegen doorlekken van wondvocht
- Buitenste laag blijft droog
- Heeft protease modulerende eigenschappen* en zorgt voor een bevorderlijke omgeving voor wondgenezing

* De superabsorberende partikels in de absorptielaag hebben een protease modulerende werking

Indicaties

- Matig tot zeer natte wonden

Frequentie van verbandwissels

Mextra® Superabsorbent kan gedurende meerdere dagen ter plaatse blijven. Het verband moet vervangen worden volgens de klinische conditie van de wonde, of wanneer het verzadigd is.

Mextra Superabsorbent assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
610000	10x10	15774929	10	50
610100	10x15	15774937	10	40
610200	10x20	15774945	10	90
610300	15x20	15774953	10	40
610400	20x25	15774961	10	40
610500	20x30	15774988	10	50

Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care en Mextra® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.