

Mepi™ Debripad

Een gebruiksvriendelijke pad voor veilig, snel en vrijwel pijnloos wonddebridement

Te gebruiken als handschoen of pad

Flexibel en eenvoudig in gebruik

Microvezeltechnologie voor veilige en effectieve verwijdering van fibrineus weefsel

Snel en eenvoudig debridement

Een gezond wondbed is essentieel voor genezing. De Mepi™ Debripad biedt een eenvoudige manier om dode cellen en weefsel te verwijderen, zo vaak als nodig is, zodat het genezingsproces kan beginnen.

Veilig en eenvoudig in gebruik

Mepi Debripad wordt goed verdragen door patiënten en biedt een grondige, therapeutische reiniging. Het is ook ontworpen voor gebruiksgemak.

Wondzorg waarop je kan vertrouwen

Dankzij de microvezeltechnologie is de Mepi Debripad zowel zacht als grondig, en daarmee een waardevolle toevoeging aan Mölnlycke's wondzorgportfolio.

Gebruiksaanwijzing Mepi™ Debripad



1. Week Mepi™ Debripad in 20 ml steriele zoutoplossing of een andere geschikte wondreinigingsoplossing. Steek de hand in de handschoenopening van de pad.



2. Reinig het wondoppervlak voorzichtig, zonder druk uit te oefenen, met de zachte zijde van de pad (de zijde die van de handpalm af is gericht).



3. Reinig indien nodig de huid rondom de wond met een andere goed bevochtigde Mepi™ Debripad.

Productbeschrijving

De Mepi Debripad debridement pad is een microvezelpad van polyester/polyamide, ontworpen voor snel, veilig en vrijwel pijnloos debridement van wonden. Elke pad is steriel verpakt en bedoeld voor eenmalig gebruik.

Voordelen van Mepi Debripad

- Effectief in het verwijderen van beslag en wondresten
- Bereidt de wond en omliggende huid veilig voor op genezing
- Eenvoudig en logisch in gebruik
- Zacht en vrijwel pijnloos debridement
- Verkrijgbaar in twee maten, passend bij de meeste wonden
- Kan volledig ondergedompeld worden zonder prestatieverlies

Indicaties voor gebruik

- Diabetische ulcera
- Arteriële en veneuze ulcera
- Doorligwonden
- Postoperatieve wonden die genezen via secundaire intentie
- Traumatische of chirurgische wonden (bijv. schaafwonden, incisies, scheuren)
- Brandwonden en verbrandingen (derdegraads: na chirurgisch debridement)
- Niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor een van de samenstellende materialen
- Chirurgische implantatie
- Hard necrotisch weefsel of levend/granulerend weefsel

Voorzorgsmaatregelen

- Alleen te gebruiken onder begeleiding van een zorgverlener
- Alleen voor eenmalig gebruik; niet (gedeeltelijk) hergebruiken, omdat dit de sterilisatie en/of werking van het verband kan aantasten
- Niet hersteriliseren
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is of als er tekenen van besmetting op de pad aanwezig zijn
- Mepi Debripad debridement pads niet knippen
- Mepi Debripad debridement pads niet op de wond laten zitten
- Mepi Debripad debridement pads mogen niet worden ingeslikt en moeten buiten bereik van kinderen en dieren worden gehouden

Mepi™ Debripad assortiment (steriel verpakt)

	Artikel nummer	Z-index	Afmeting (cm)	RET	TRP
Mepi Debripad ovaal	300111	17403782	11x18	5	50
Mepi Debripad rond	300113	17403790	13 cm (diameter)	5	50

Meer informatie op molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel: +31 76 521 96 63.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, Mepi en Mepilex zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. NLWC00022507