

# Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

Guide pour l'application du produit



Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

  
Mölnlycke<sup>®</sup>

# Guide pour l'application du produit

**Préparation de la zone à risque/ de la plaie:** Nettoyez la peau. Séchez soigneusement la peau environnante. Assurez-vous de l'absence de diméthicone, d'adhésif et d'émollients. Il n'est pas nécessaire d'appliquer d'agent dermoprotecteur sous le pansement.



1. Une fois que la peau/plaie est prête, séchez soigneusement toute la zone. Retirez ensuite la partie centrale du film support et faites glisser le pansement sous le talon, jusqu'à l'endroit voulu.



2. Appliquez la partie adhérente du pansement marquée d'un « A » (voir illustration ci-dessus) sur la partie postérieure du talon/le tendon d'Achille, en plaçant sa partie la plus étroite à la base du talon. Ne tirez pas sur le pansement.



3. Ôtez le film support de l'un des rabats « A » (rabats de cheville). Appliquez et lissez le pansement. Répétez l'opération de l'autre côté. Ne tirez pas sur le pansement.



4. Appliquez délicatement la partie adhérente « B » (voir illustration ci-dessus) sous la surface plantaire. Ne tirez pas sur le pansement.



5. Ôtez le film support de l'un des rabats « B » (rabats équipés de languettes). Appliquez et lissez les bords. Répétez l'opération de l'autre côté. Ne tirez pas sur le pansement.



6. Appuyez sur le pansement et lissez-le pour vous assurer que toute sa surface est en contact avec la peau.

Rem

Si des signes cliniques d'infection apparaissent, Mepilex® Border Heel peut être utilisé moyennant un traitement approprié de l'infection.  
Ne pas utiliser le pansement sur des escarres sèches et refermées.

Conseils

- **Pensez** « A » pour « Achille » pour vous aider à appliquer le pansement correctement
- Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche
- Ne tirez pas sur le pansement en l'appliquant
- Utilisez une chaussette antidérapante si le patient est ambulatoire, elle aidera le pansement à rester en place
- Envisagez d'utiliser Tubifast® ou un autre bandage tubulaire pour consolider le pansement dans le cas de patients agités ou si le pansement se détache prématurément : le pansement est conçu pour respecter la peau

# Guide de réapplication pour la prévention des escarres



1. Tirez délicatement les languettes pour détacher le pansement de la peau.



2. Détachez le reste du pansement en continuant de tirer les languettes de manière à exposer la peau pour l'inspecter.



3. Tout en maintenant la position du pansement à l'extrémité proximale du rabat « A » (voir photo), examinez la peau.



4. Réappliquez le coussin hydrocellulaire et le bord du pansement. Veillez à ce que les rabats équipés de languettes viennent se placer au-dessus des rabats de cheville.




5. Vérifiez que vous avez replacé le pansement dans sa position d'origine, et que ses bords sont intacts et plats.



6. Appuyez sur le pansement et lissez-le pour vous assurer que toute sa surface est en contact avec la peau.

7. Réenfilez l'éventuelle chaussette antidérapante, surtout si le patient est ambulatoire.

# Fonctionnement de Mepilex® Border Heel

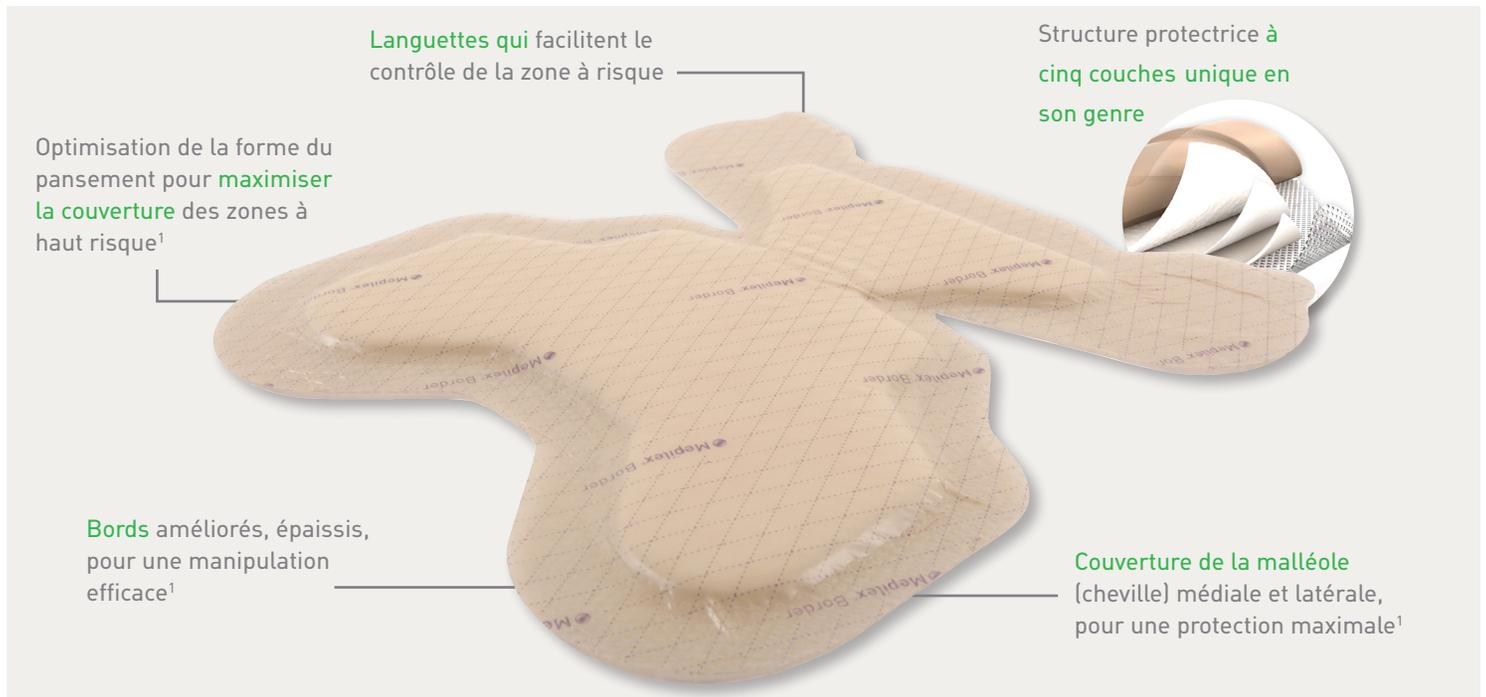

## Atouts

- ✓ Languettes facilitant l'inspection de la peau
- ✓ Bord sensiblement plus épais, pour une meilleure manipulation et une meilleure capacité à rester en place
- ✓ Forme adaptée à celle du talon, le pansement ne doit être ni découpé ni adapté
- ✓ Réduit la douleur et le traumatisme au retrait du pansement<sup>5, 6, 7</sup>
- ✓ Couverture de la malléole médiale et latérale pour une protection maximale
- ✓ Pansement susceptible de rester en place plusieurs jours
- ✓ Possibilité de réajustement sans perte d'adhérence
- ✓ Absorption de niveau d'exsudat modéré à haut<sup>8</sup>

## Prévention

Mepilex® Border Heel est conçu pour s'adapter au talon et protéger les zones autour du talon, le tendon d'Achille et les malléoles interne et externe.

Utilisé à titre **préventif\***, il aide à protéger la peau contre les lésions dues à la pression, au cisaillement et aux frictions<sup>2</sup>. La couche équipée de la technologie **Safetac®** protège la peau en maintenant le pansement dans une position optimale et en réduisant les frictions et le cisaillement à l'interface entre la peau et le pansement<sup>2</sup>.

## Traitement

Mepilex® Border Heel, lorsqu'il est utilisé à titre **curatif**, absorbe et retient efficacement l'exsudat<sup>3</sup> tout en maintenant l'hydratation de l'environnement de la plaie. La couche équipée de la technologie **Safetac®** scelle les bords de la plaie et prévient les écoulements d'exsudat sur la peau périlésionnelle, réduisant ainsi le risque de macération<sup>4</sup>. La technologie **Safetac®** permet en outre de changer le pansement sans endommager ni la plaie ni la peau périlésionnelle,<sup>5</sup> et sans exposer le patient à des douleurs supplémentaires<sup>6</sup>.

## Informations de commande Mepilex® Border Heel‡

| Code CNK | Code produit | Dimensions | Pcs/RET |
|----------|--------------|------------|---------|
| 3590-114 | 282750       | 22 x 23 cm | 6       |

‡ Emballage individuel stérile

\* Utilisation dans le cadre d'un protocole de prévention générale

**Références:** 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. Bill, B. et al. Wound dressing shear test method (bench) providing results equivalent to humans. For Mölnlycke Healthcare. 3. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 4. Call, E et al. Enhancing Pressure Ulcers Prevention Using Wound dressings: What are the modes of action. Int Wound J; doi: 10.1111/iwj.12123 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 8. Barry, L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity. Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE - 2600 Berchem, Belgique. Tél. + 32 3 286 89 50  
Les marques, noms et logos Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont déposés par le groupe de sociétés Mölnlycke Health Care pour le monde entier.  
© 2017 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00261708

  
**Mölnlycke®**